




HARNISCH+RIETH

Entkalkung Dampfstrahlgerät D-S 100 A



Bitte beachten!

- ✓ Bei blinkender Warnleuchte  (26) umgehend eine Entschlammung des Kessels vornehmen!
- ✓ Je nach Wassertyp wird empfohlen folgende Entkalkungszyklen einzuhalten:
Leitungswasser nach 100 Betriebsstunden oder wenigstens einmal in 2 Monaten
Destilliertes Wasser nach 400 Betriebsstunden oder wenigstens einmal in 4 Monaten
Ausschließlich Harnisch+Rieth Entkalker „[Kalk Clean Artikel Nr. 15271](#)“ verwenden!
- ✓ Andere Entkalker wie Zitronensäure können das Gerät beschädigen
- ✓ Achtung: Die Entkalker Lösung ist ätzend! Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- ✓ Gerät während der Entkalkung nicht betreiben

Wir empfehlen unser hauseigenes [Filtersystem „Kalk Free“](#), um Kalkschäden sowie daraus entstehende Folgekosten effektiv zu vermeiden.

Step-by-step

1. Gerät auf externe Wasserversorgung umstellen.
2. Gerät muss vor dem Spülvorgang drucklos (s. Manometer) und abgekühlt sein.
3. Ablassventil mittels Steckschlüssel öffnen.
4. Spültaste drücken und gedrückt halten. Gerät am Hauptschalter einschalten.
5. Die Spültaste gedrückt halten, bis das fließende Wasser keine Kalkpartikel mehr aufweist.
6. Gerät ausschalten, Spültaste lösen und das Ablassventil schließen.
7. Gerät auf interne Wasserversorgung (Tank) umstellen. Wassertank vollständig leeren.
8. Tank mit Entkalkungslösung Kalk Clean befüllen (Mischungsverhältnis beachten)
9. Gerät einschalten und Dampfbereitschaft herstellen.
10. Fußschalter ausstecken (unbeabsichtigtes Auslösen)
11. Gerät in eingeschaltetem Zustand ca. 8h stehen lassen. Gerät ausschalten.
12. Ablassventil öffnen und Druck ablassen. Ablassventil offen lassen.
13. Gerät auf externe Wasserversorgung umstellen. Spültaste drücken und gedrückt halten.
14. Gerät einschalten, Spültaste gedrückt halten, bis das fließende Wasser keine Kalkpartikel mehr aufweist.
15. Gerät ausschalten, Spültaste lösen und das Ablassventil schließen. Entkalkungsvorgang eventuell wiederholen.
16. Wassertank mit der restlichen Entkalkungslösung vollständig entleeren (mit Ansaugschlauch o.Ä.)
17. Fußschalter wieder einstecken. Gerät ist einsatzbereit.

Weitere Informationen

Weitere Informationen wie Anleitungen, Sicherheitsdatenblätter, FAQ, etc. finden Sie auf unserer Website.