



HARNISCH+RIETH

Entkalkung Dampfstrahlgerät D-S 100



Bitte beachten!

- ✓ Bei blinkender Warnleuchte (26) umgehend eine Entschlammung des Kessels vornehmen!
- ✓ Je nach Wassertyp wird empfohlen folgende Entkalkungszyklen einzuhalten:
Leitungswasser nach 100 Betriebsstunden oder wenigstens einmal in 2 Monaten
Destilliertes Wasser nach 400 Betriebsstunden oder wenigstens einmal in 4 Monaten
Ausschließlich Harnisch+Rieth Entkalker „[Kalk Clean Artikel Nr. 15271](#)“ verwenden!
- ✓ Andere Entkalker wie Zitronensäure können das Gerät beschädigen
- ✓ Achtung: Die Entkalker Lösung ist ätzend! Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen
- ✓ Gerät während der Entkalkung nicht betreiben

Wir empfehlen unser hauseigenes [Filtersystem „Kalk Free“](#), um Kalkschäden sowie daraus entstehende Folgekosten effektiv zu vermeiden.

Step-by-step

1. Gerät einschalten und Spülvorgang durchführen.
2. Gerät ausschalten und Ablasshahn mittels Steckschlüssel öffnen und offenlassen.
3. Wassertank vollständig entleeren.
4. Tank mit Entkalkungsmittel Kalk Clean (Mischungsverhältnis beachten) befüllen.
5. Ablassventil schließen.
6. Gerät einschalten und Dampfbereitschaft herstellen.
7. Fußschalter ausstecken (unbeabsichtigtes Auslösen wird somit vermieden).
8. Gerät in eingeschalteten Zustand ca. 8 Std. stehen lassen.
9. Gerät ausschalten.
10. Ablassventil öffnen und Druck ablassen. Entkalkungsvorgang eventuell wiederholen.
11. Wassertank vollständig entleeren und mit sauberem Wasser befüllen.
12. Ablassventil schließen und Gerät einschalten und aufheizen bis Dampfbereitschaft Signalleuchte (19) leuchtet.
13. Gerät ausschalten und Ablassventil öffnen.
14. Punkt 12 wiederholen, ggf. Wassertank nochmals befüllen.
15. Gerät ausschalten und Ablassventil schließen.
16. Fußschalter wieder einstecken. Gerät ist einsatzbereit.

Weitere Informationen

Weitere Informationen wie Anleitungen, Sicherheitsdatenblätter, FAQ, etc. finden Sie auf unserer Website.