

Anleitung

Reinigung Dosiergehäuse P-G 400/4/3/2

Störung


Sandstrahlmenge ist zu niedrig bzw. es kommt kein Strahlmittel an.

HINWEIS NETZSTECKER VOM NETZ TRENNEN



1

schwarze Rändelschraube
links öffnen und Oberteil
des Gerätes hochklappen

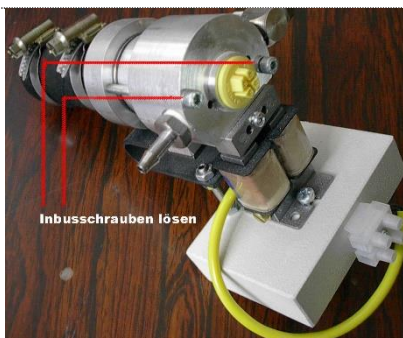

Die 2 Inbusschrauben an der
Mischkammer lösen


2



HARNISCH+RIETH

E O

Oberteil der Mischkammer vom Unterteil abziehen, Dosiergehäuse mit blauem Schlauch wird sichtbar. Dosiergehäuse herausnehmen

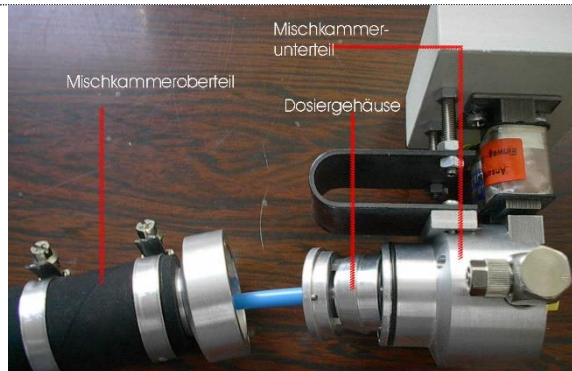

3



Spalt A des Dosiergehäuses reinigen (Druckluft)

4

Spalt B des Dosiergehäuses reinigen (Druckluft)



5



ev. Spaltmaß B durch Verdrehen leicht vergrößern (Ursprungsposition markieren)

6